

Model 3100

Model 3100 Quick-Start Guide

クイックスタートガイド



1

バッテリーの挿入方法



- (1) 図のようにチェストピースのチューブ側部位を約25度手前方向に回すとキャップが外れます。
- (2) 新しい単三形電池のプラスとマイナスの位置を確認して図のように挿入してください。
- (3) キャップを元の位置に合わせて今度は逆方向に約25度回し、固定できるまで回してください。
- (4) それぞれの矢印が一致していることを確認してください。

2

イアーチップの挿入方向

イアーチップを図に示す方向に挿入してください。イアーチップが正しい位置に挿入されると聴診器のダイアフラムの向きは体の方向に向きます。



3

電源 オン／オフ

● 電源オン:

電源ボタンを2秒間程押してください。
液晶画面にスタート画面が現れます。
これで本品は電源がオンの状態になります。

● 電源オフ:

電源オンの状態で電源ボタンを2秒間程
押してください。しばらくして、液晶画面が
消えて電源オフの状態になります。



4

周波数モードの選択

アイコンが設定したい周波数モードになるまで、
周波数モード選択ボタンを押してください。



ダイアフラムモード
アイコン
(Diaphragm Mode Icon)



ベルモード アイコン
(Bell Mode Icon)



5

音量レベルの調整

音量を上げる: プラス (+) ボタン

音量を下げる: マイナス (-) ボタン



6

心拍数の表示



7 電池の残量の表示

-  = 50～100%の電池容量あり
-  = 25～50%の電池容量あり
-  = 10～25%の電池容量あり
-  = 0～10%の電池容量あり



8 カスタム設定

セットアップ (SETUP) 画面により様々な設定を行うことができます。
詳しくは取扱説明書を参照。





3M, Littmann, リットマンは3M社の商標です。

スリーエム ヘルスケア株式会社
医療用製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/hc/littmann/>

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで



0570-011-321

ナビダイヤルは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間：8:45～17:15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く）

ナビダイヤルが繋がらない場合は、03-3709-8185までご利用ください。

TEL:03(3709)8185

3M