

このたびは、グリッターバグをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
装置を正しくご利用頂くために本取扱説明書をお読み下さい。

■ 内容物

名称	数量	写真
グリッターバグ本体 (目玉シール 2 枚含む)	1 台	
ランプキット(ランプ 1 本含む)	1 台 1 本	
AC アダプター	1 個	

■ グリッターバグ本体の使用方法

1. ランプキットのご使用方法に沿って以下の手順で操作して下さい。

(※ お好みに応じて付属の目玉シールをランプキット背面に貼付下さい。下図参照。)

➤ ACアダプターでご使用になる場合

- ① ランプキットの中に乾電池が入っていない事及び、スイッチがOFFになっていることを確認して下さい。乾電池が入った状態でACアダプターを使用しますと乾電池が液漏れをおこす可能性があります。
- ② ACアダプターをランプキットに差し込んでから、電源コンセントに接続して下さい。

➤ 乾電池でご使用になる場合

- ① 乾電池(単一)4本をご用意下さい。乾電池は全て同等なものをご使用下さい。
- ② ランプキットのケースに記された方向に従い、蓋を開けて乾電池を正しい向きで挿入し、蓋を閉めて下さい。

2. ランプキットをグリッターバグ本体にセットして下さい。
3. ランプキットのスイッチを ON にしてご使用下さい。



(裏面もお読み下さい)

■ グリッターバグの使用法

手順	方法	写真
1	ローションのポンプを1～2回押してローションを手取る。 ※ローションの1プッシュの量は約 0.8mlです。	
2	ローションをまんべんなく手指の表面(表裏)全体につける。	
3	手をグリッターバグの中に入れ、蛍光(青白い光)を確認する。	
4	手をいつものように洗剤や石鹸を使用して洗い、乾かす。	
5	手を再びグリッターバグの中に入れ、蛍光を確認する。 蛍光の確認できる箇所が洗いの不十分な箇所です。	
6	洗い残しがなくなるまで上記 4) 及び、5)を繰り返しましょう。 ご自身の手洗い方法の問題点を発見・認識し、次回からの手洗いにお役立て下さい。	

■ ご注意

- (1) 正しい手洗いを行なった場合でも、蛍光剤が多少残ることがあります。本製品の目的は洗い不十分な箇所を明確化する事であり、必ずしも 100%洗い落とすまで手洗いを行なう必要はありません。
- (2) ローションは室温で保管し、長期にわたって 30℃を超える場所には保存しないで下さい。
- (3) 皮膚に異常のある部分や皮膚アレルギーのある方はお使いにならないで下さい。ローションの使用後に湿疹やかゆみ等、皮膚の異常が発見された場合は、すみやかに医師の診察を受けて下さい。

■ 危険

- (1) 濡れた手で装置やランプを触らないで下さい。感電する恐れがあります。
- (2) 点灯したランプを長時間直接見ないで下さい。
- (3) 乾電池とACアダプターの併用はおやめ下さい。ACアダプターを使用する際は、乾電池をランプキットから取り出して下さい。
- (4) お客様による本体の解体や修理は、危険ですので絶対に行わないで下さい。



株式会社ニチオン

〒273-0018 千葉県船橋市栄町 2-12-4

TEL047-431-1871 FAX047-431-1878

(Rev#2; 2007/5/8)