

折りたたみ 診察台 取扱説明書

- ・ご使用になる前に

本体中央のロックバーを跳ね上げロックを解除します。二枚の板が水平な状態になるまで脚を広げ、中心が確実にロックされているかを確認して下さい。

- ・ご使用に際して

診察時に患者を寝かせた状態で診療して下さい。

利用の際は、必ず台中央から乗り降りするようにして下さい。

- ・安心な診療が行なえる様、下記の事項をお守り下さい。

本体は平らな場所に設置して下さい。

ガタツキがないようアジャスターで調整してからご使用下さい。

キャスターは必ずロックを掛けてご使用下さい。



注 意

傾斜や振動のある場所での使用や
衝撃のかかる様な使用は行わないで下さい

例えば

- 1 台の上に立ち上がったり、飛び跳ねたりの使用
- 2 マッサージや指圧台としての使用
- 3 器機を置いたり、隅に腰掛けたりの使用
- 4 水がかかったり、濡れたりする様な使用
等は行なわないで下さい。

- ・収納するときは

天板を押さえ、中央のつまみを回しながら引いてロックを解除し、二枚の板を折りたたみ合わせた状態で、ロックバーが固定されたかを確認してから収納して下さい。

内容の確認がいつでもできるよう「取扱説明書」は大切に保管して下さい。

長くご愛用いただく為に、カバーを掛けてご使用なさることをお勧めします。

マルセンオオキ(株)

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目24番16号

TEL 03 (3816) 5111

FAX 03 (3816) 1935・1098