

縫合練習キット取扱説明書 **USER'S GUIDE**

使用される前に必ずお読みください。

縫合キット構成 最初に全て揃っている事をご確認ください。

収納ケースには以下のものが入っています。(数量記載の無いものは1ヶ。)

1. スキンシミュレーター (縫合パッド Pro(L)&保持枠)
2. ヘガール持針器
3. 眼科剪刀
4. 外科ピンセット
5. 3号外科強彎角針 5本
6. 3-0 絹製縫合糸 40cm×10本、20m 巻1ヶ
7. スカルペル No.11

ラテックス・フォーム・ラバー製パッド 取扱上の注意

1. 使用にならないときは、必ずポリエチレン袋で密封し、直射日光のあたらない暗所で保管してください。空気中のオゾンや直射日光によりパッドが変性する恐れがあります。
2. パッドに触れる前に必ず手を十分に洗ってください。(金属に触れた後にパッドに触れた場合、変色することがあります。)
3. パッドが汚れた場合は、中性洗剤で洗浄後清潔な水でよく濯いでください。
4. 絶対にパッドを口に入れないで下さい。
5. ラテックス製品使用によりアレルギー性の症状を起こされた方は、直ちに使用を中止し、専門医の治療を受けてください。

器械類・メス・縫合材料 取扱上の注意

1. これら器械類・メス・縫合材料は、トレーニング用です。絶対に医療現場でご使用にならないで下さい。
2. メス・縫合針・器械類は危険ですので取り扱いや保管には十分ご注意ください。
3. メスの保管; キャップをして保管して下さい。

お問い合わせ先:

日本ライトサービス株式会社 TEL:03-3815-2354 FAX:03-3818-6843

e-mail: igaku@nlsinc.co.jp URL: <http://www.nlsinc.co.jp/igaku.htm>